

DiverseyTM

Oxivir Plus Spray

Desinfioiva puhdistusaine

Kuvaus tuotteesta

Käyttövalmis ympäristömyönteinen, hapettava (peroksidipohjainen) puhdistus- ja desinfektioaine vettä sietävien pintojen pesuun ja desinfektioon, myös lääkinnällisille laitteille. Käyttäjäturvallinen. Tehoa myös viruksiin. CE IIa-merkitty, PT2- ja PT4-hyväksyntä.

Ominaisuudet

- Teho viruksiin, bakteereihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti.
- Tuotteella on CE IIa -sertifiointi.
- Säilyvyys käyttöön otettuna / avamattomana 2 vuotta valmistuspäivästä.
- Puhdistaa ja desinfioi samanaikaisesti vähentäen tarvittavaa työaikaa.
- Soveltuu laajalti erilaisiin kohteisiin terveydenhuollon vaativista olosuhteista keittiö- ja mm. kosteiden tilojen desinfioivaan puhdistukseen.

Edut

- Käyttäjälle turvallinen ja helppo käyttää.
- Tavanomaisiin desinfektioaineisiin verrattuna tuote on ympäristömyönteisempi.
- Soveltuu kevytmetallipintojen puhdistukseen (mm. alumiini).
- Herkkiä materiaaleja käsiteltäessä noudata laitevalmistajan ohjeita sekä testaa tuotteen soveltuvuus.
- Mikrokiutupyhkeen käyttö lisää tuotteen puhdistustehoa.
- Kestää likarasiusta ja emulgoi erinomaisesti ihorasvaa.
- Ei valkaise eikä jätä puhdistettaville pinnoille raitoja.
- Ehkäisee kalkkikiven muodostusta.
- Soveltuu tekstiilipintojen desinfioivaan puhdistukseen.
- Soveltuu myös aroille tekstiileille, Wool Safe-hyväksyntä.

Käyttöohje

Pintadesinfektio:




Pyyhi pinta huolellisesti liuokseen / vaahtoon kostutetulla siivouspyyhkeellä tai suihkuta vaahto pinnoille ja kuivaa siivouspyyhkeellä. Käytä likaisuusasteesta riippuen joko kostea- tai märkäpyyhintää. Eritetahradesinfektio: Levitä liuos / vaahto suoraan tahraan ja pyyhi tahra pois.

Tekstiilipintojen desinfioiva puhdistus: Poista irtolika tai erite. Annostele liuos / vaahto suoraan tahralle ja poista se pehmeällä harjalla tai siivouspyyhkeellä. Etene tahrnan keskustaa kohden. Imeytä liuennut tahra paperiin tai siivouspyyhkeeseen. Huuhtelee lopuksi pinta vedessä kostutetulla siivouspyyhkeellä ja imeytä pinnalla oleva kosteus paperiin tai siivouspyyhkeeseen.

Annostus

Käyttövalmis

**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*

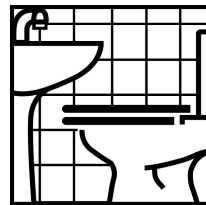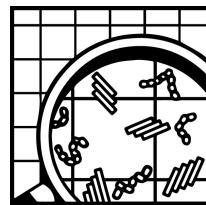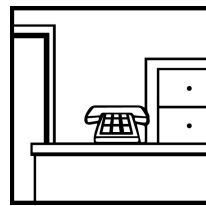

© A.I.S.E



Oxivir Plus Spray

Tekniset tiedot

pH-arvo (laimentamaton): < 2
Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Säilyvyys: 2 vuotta

Huomioitavaa: Käytä suojakäsineitä! Ei saa käyttää marmoripinnoille. Älä sekoita toisten tuotteiden kanssa.

Mikrobiologiset tiedot

Teho viruksiin, bakteereihin, itiöihin ja hiivoihin on osoitettu EU-normien mukaisesti. Tuotteella on CE IIA -sertifiointi. Pyydä tarvittaessa testitulokset edustajaltamme.

Ympäristötiedot

Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin 648/2004 mukaisesti.

www.diversey.com

© 2021 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 01/12/2021 fi-FI (K00240)